

LIBIDO POMP

EEN GROTERE PENIS GEEFT
MANNEN MEER ZELFVERTROUWEN



**BESTEL IN
COMBINATIE
MET
LIBIDO7!**

HANDLEIDING LIBIDO ELEKTRISCHE POMP

LIBIDO POMP

**HOE GEBRUIK JE DE LIBIDOPOMP ZORGVULDIG?
LEES VOOR HET **GEBUIK DE HANDLEIDING** GOED DOOR**

**BESTEL IN
COMBINATIE
MET
LIBIDO7!**



INHOUD VAN DIT PAKKET

- Elektrische pomp
- Cilinder
- Zwarte conus
- 1 Maatringen van rubber
- 4 Elastische drukringen

LIBIDOPOMP

BESCHRIJVING

De Libido elektrische pomp bestaat uit een elektrische pomp, vacuÛmcilinder, conus, drukringen en een rubberen maatring. Laat de drukring nooit langer dan 30 minuten om de penis zitten. Gebruik altijd een goed glijmiddel om zo de cilinder gemakkelijk om te schuiven.

OMSCHRIJVING LIBIDO ELEKTRISCHE POMP

De elektrische pomp van Libidopomp is een medisch apparaat van zeer hoge kwaliteit. Met deze elektrische pomp krijgt u binnen enkele minuten een grotere en dikkere penis.

COMPONENTEN

1. Cilinder
2. Elektrische pomp
3. Zwarte conus
4. Maatring van rubber
5. Elastische drukringen
6. Libido7



**BESTEL IN
COMBINATIE
MET
LIBIDO7!**



LIBIDOPOMP

EEN GROTERE PENIS GEEFT
MANNEN MEER ZELFVERTROUWEN

- Vergroot je penis met 5 á 7 centimeter!
- Laat je penis groeien in lengte en dikte!



PENIS VERGROTING MET DE LIBIDOPOMP

HOE WERKT HET?

Je kunt de Libidopomp gebruiken om de penis te vergroten en om een erectie te krijgen. Per stap wordt uitgelegd hoe je de pomp klaarmaakt voor gebruik. Hier lees je hoe je een penisvergroting creëert met de Libidopomp. Deze vergroting zal maximaal enkele centimeters bedragen. De handelingen blijven hetzelfde als de handelingen voor het creëren van een erectie, maar nu gebruik je de elastische drukringen uit stap 4 en stap 8 **niet**. Laat de penis in de buis zitten en pomp maximaal drie seconden. Herhaal deze handeling meerdere keren met tussen pauzes van 10 seconden. Ga net zo lang door totdat er een volle erectie ontstaat.

Stop ook nu weer met pompen indien het niet prettig aanvoelt. Ga pas weer verder als het weer prettig voelt.

Laat de penis rustig opzwellen en pomp dan weer verder. Het is belangrijk dat je dit rustig doet en hier de tijd voor neemt. De penis vult zich telkens met meer bloed en wordt hierdoor steeds groter. Herhaal deze handeling twee keer per dag voor het beste resultaat. Neem hierbij wel in ogenschouw dat het even kan duren voordat de penis gewend is aan dit proces. Daarom is het raadzaam om eerst een aantal keer te oefenen met het apparaat.

Lees en bekijk eerst goed welke stappen je moet nemen, voordat je de Libidopomp echt gaat gebruiken!

LIBIDOPOMP

EEN GROTERE PENIS GEEFT
MANNEN MEER ZELFVERTROUWEN

- Vergroot je penis met 5 á 7 centimeter!
- Laat je penis groeien in lengte en dikte!



BESTEL IN
COMBINATIE
MET
LIBIDO7!



KLAARMAKEN VOOR GEBRUIK


STAP 1 PLAATS DE BATTERIJEN

Voordat je de elektrische pomp van Libidopomp gaat gebruiken, moet je eerst de batterijen in de pomp plaatsen. De pomp wordt inclusief batterijen geleverd. Gebruik geen oplaadbare batterijen.



STAP 2 DE ZWARTE CONUS

Vervolgens pak je de zwarte conus. Deze heb je bij stap 3 nodig. Wil je alleen je penis vergroten? Dan kan je deze stap overslaan.

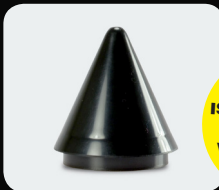

DEZE STAP
IS NIET NODIG
VOOR HET
VERGROTEN

LIBIDOPOMP

EEN GROTERE PENIS GEEFT
MANNEN MEER ZELFVERTROUWEN

- Vergroot je penis met 5 á 7 centimeter!
- Laat je penis groeien in lengte en dikte!



BESTEL IN
COMBINATIE
MET
LIBIDO 7!



KLAARMAKEN VOOR GEBRUIK

STAP 3 DE CILINDER

Je gaat nu de zwarte conus op de cilinder plaatsen. De zwarte conus plaats je aan de voorkant van de cilinder.

Wanneer je een erectiestoornis hebt, kan de Libidopomp de zwellichamen op een kunstmatige manier activeren, zodat ze alsnog bloed opnemen en er een erectie kan ontstaan. De luchtdichte cilinder wordt na het klaarmaken voor gebruik, over de penis geplaatst waarna deze vacuüm kan zuigen. De vacuümpomp die later wordt bevestigd, zorgt ervoor dat de cilinder luchtdicht wordt.

DEZE STAP
IS NIET NODIG
VOOR HET
VERGROTEN



LIBIDOPOMP

EEN GROTERE PENIS GEEFT
MANNEN MEER ZELFVERTROUWEN

- Vergroot je penis met 5 á 7 centimeter!
- Laat je penis groeien in lengte en dikte!



BESTEL IN
COMBINATIE
MET
LIBIDO7!



KLAARMAKEN VOOR GEBRUIK

STAP 4 ELASTISCHE DRUKRINGEN

Afhankelijk van de grootte van de penis kun je bekijken welke elastische drukring het beste om de stam van de penis past. Je pakt vervolgens de juiste maat drukring en schuift deze om de zwarte conus heen. Je kunt het beste de drukring met beide handen bevestigen. Je bevestigt de elastische drukring vervolgens om de cilinder, zoals in het voorbeeld te zien is.

De elastische drukring zorgt ervoor dat de penis wordt afgebonden aan het einde van het pompen.

DEZE STAP
IS NIET NODIG
VOOR HET
VERGROTEN



LIBIDOPOMP

EEN GROTERE PENIS GEEFT
MANNEN MEER ZELFVERTROUWEN

- Vergroot je penis met 5 á 7 centimeter!
- Laat je penis groeien in lengte en dikte!



KLAARMAKEN VOOR GEBRUIK

STAP 5 MAATRINGEN VAN RUBBER

Je verwijdert de zwarte conus van de cilinder. Afhankelijk van de omtrek grootte van de penis kan je bekijken welke rubberen maatring het beste geplaatst kan worden op de cilinder. De maatringen waarborgen het vacuüm in de cilinder.

Zodra je de cilinder om de penis plaatst moet je er voor zorgen dat je een goed glijmiddel gebruikt, om zo de cilinder makkelijk om te kunnen schuiven. Smeer niet alleen de rubberen maatring in met glijmiddel, maar smeer ook het gedeelte van de buik in waar de penis pomp tegen aan wordt geplaatst. Hiermee zorg je voor een goed luchtdichte afsluiting tussen de buik en het einde van de cilinder.



LIBIDOPOMP

EEN GROTERE PENIS GEEFT
MANNEN MEER ZELFVERTROUWEN

- Vergroot je penis met 5 á 7 centimeter!
- Laat je penis groeien in lengte en dikte!



BESTEL IN
COMBINATIE
MET
LIBIDO7!



KLAARMAKEN VOOR GEBRUIK

STAP 6 POMP BEVESTIGEN

Je gaat nu de elektrische pomp bevestigen aan de cilinder. Doordat de pomp aangesloten is op de cilinder, kan er vacuüm in de cilinder gezogen worden.

Voordat je de pomp op de penis plaatst, raden wij aan om eerst te oefenen op de hand. Je plaatst de cilinder tegen de hand en drukt op de aan/uit knop die op de elektrische pomp zit. Je zult dan de druk voelen van het vacuüm pompen. Indien dit niet gebeurt kun je je hand rond bewegen om de pomp beter vast te zetten. Om het vacuüm los te laten, druk je op de aan/uit knop.



LIBIDO POMP

EEN GROTERE PENIS GEEFT
MANNEN MEER ZELFVERTROUWEN

- Vergroot je penis met 5 á 7 centimeter!
- Laat je penis groeien in lengte en dikte!



GEBRUIK

STAP 7 POMPEN

Om pijnlijke situaties te voorkomen bij het vacuüm pompen, adviseren wij om wat schaamhaar te verwijderen. Wanneer je dit gedaan hebt, en de cilinder om het geslachtsdeel hebt geschoven, kun je deze sluiten door de cilinder voorzichtig heen en weer te schuiven waardoor een luchtdichte verzegeling plaatsvindt.

De pomp werkt het beste als je gaat staan. Zorg ervoor dat wanneer je begint met pompen je, testikels niet in de cilinder plaatst. Controleer nogmaals of alles echt goed zit en begin langzaam met pompen.

Pomp de eerste keer niet meer dan drie seconden en laat het bloed langzaam naar de penis stromen. Herhaal deze handeling met korte tussen pauzes om de 10 seconden.

Let erop dat je dit niet te snel doet, want dat kan een verstoring van de erectie opleveren. Stop ook wanneer het pompen niet fijn voelt. Laat de penis rustig opzwellen en pomp dan weer langzaam verder. Het is belangrijk dat je dit rustig doet en hier de tijd voor neemt. De penis vult zich telkens met meer bloed en wordt hierdoor steeds groter.

LIBIDOPOMP

EEN GROTERE PENIS GEEFT
MANNEN MEER ZELFVERTROUWEN

- Vergroot je penis met 5 á 7 centimeter!
- Laat je penis groeien in lengte en dikte!



STAP 8 PENIS AFBINDEN

Op het moment van erectie, schuif je de elastische drukring van de cilinder af, in de richting naar de buik, zodat deze over de basis van de penis komt. Pak de drukring bij de lussen en trek deze zo naar je toe. Je kunt nu de rode knop op de elektrische pomp indrukken en het vacuüm zal langzaam teruglopen en kunt je de Libidopomp van de penis afhalen. De drukring voorkomt dat het bloed weer terug stroomt en zorgt dat de penis goed stijf blijft. De elastische drukring mag hooguit 30 minuten blijven zitten, anders kan het weefsel van de penis beschadigd raken.

NB Het kan voorkomen dat de bloedvaten in de penis niet direct reageren. Dit heeft er mee te maken dat zij nog niet gewend zijn aan dit proces. Oefen daarom eerst een paar keer en je zult merken dat je het snel onder de knie krijgt, en ontdek welke techniek het beste bij jou past!

**DEZE STAP
IS NIET NODIG
VOOR HET
VERGROTEN**



LIBIDOPOMP

Copyright © Libidopomp 2014 All Rights are reserved
www.libidopomp.nl