

LIBIDO POMP

EEN GROTERE PENIS GEEFT
MANNEN MEER ZELFVERTROUWEN



BESTEL IN
COMBINATIE
MET
LIBIDO7!

HANDLEIDING LIBIDO HANDPOMP

LIBIDO**POMP**

HOE GEBRUIK JE DE LIBIDOPOMP ZORGVULDIG?
LEES VOOR HET **GEBUIK DE HANDLEIDING GOED DOOR**



INHOUD VAN DIT PAKKET

- Handpomp
- Plastic slang
- Cilinder
- Witte conus
- 2 Maat ringen van rubber
- 4 Elastische drukringen

LIBIDOPOMP

BESCHRIJVING

De Libido handpomp bestaat uit een handpomp, vacuümcilinder, vacuümslang, conus, drukringen en rubberen maatringen. Laat de drukring nooit langer dan 30 minuten om de penis zitten. Gebruik altijd een goed glijmiddel om zo de cilinder gemakkelijk om te schuiven.

OMSCHRIJVING LIBIDO HANDPOMP

De handpomp van Libidopomp is stil en zeer effectief in gebruik. Door met de hand de pomp te bedienen zorg je in een handomdraai voor vacuüm in de cilinder en krijgt je binnen enkele minuten een grotere en dikkere penis!

COMPONENTEN

1. Handpomp
2. Vacuümslang
3. Vacuümcilinder
4. Conus
5. Drukringen
6. Maat ring van rubber
7. Libido7



**BESTEL IN
COMBINATIE
MET
LIBIDO7!**





LIBIDOPOMP

EEN GROTERE PENIS GEEFT
MANNEN MEER ZELFVERTROUWEN

- Vergroot je penis met 5 á 7 centimeter!
- Laat je penis groeien in lengte en dikte!



PENIS VERGROTING MET DE LIBIDOPOMP

HOE WERKT HET?

Je kunt de Libidopomp gebruiken om de penis te vergroten en om een erectie te krijgen. Per stap wordt uitgelegd hoe je de pomp klaarmaakt voor gebruik. Hier lees je hoe je een penisvergroting creëert met de Libidopomp. Deze vergroting zal maximaal enkele centimeters bedragen. De handelingen blijven hetzelfde als de handelingen voor het creëren van een erectie, maar nu gebruikt je de elastische drukringen uit stap 3 en stap 6 niet. Laat de penis in de buis zitten en pomp maximaal drie keer. Herhaal deze handeling ook weer met om de 10 seconden tussen pauzes.

Doe dit niet te snel en ga net zo lang door totdat er een volle erectie ontstaat. Stop ook nu weer met pompen indien het niet prettig aanvoelt. Ga pas weer verder als het weer prettig voelt.

Laat de penis rustig opzwellen en pomp dan weer langzaam verder. Het is belangrijk dat je dit rustig doet en hier de tijd voor neemt. De penis vult zich telkens met meer bloed en wordt hierdoor steeds groter. Herhaal deze handeling twee keer per dag voor het beste resultaat.

Neem hierbij wel in ogenschouw dat het even kan duren voordat de penis gewend is aan dit proces. Daarom is het raadzaam om eerst een aantal keer te oefenen met het apparaat.

Lees en bekijk eerst goed welke stappen je moet nemen, voordat je de Libidopomp echt gaat gebruiken!



LIBIDOPOMP

EEN GROTERE PENIS GEEFT
MANNEN MEER ZELFVERTROUWEN

- Vergroot je penis met 5 á 7 centimeter!
- Laat je penis groeien in lengte en dikte!



BESTEL IN
COMBINATIE
MET
LIBIDO7!



KLAARMAKEN VOOR GEBRUIK

STAP 1 DE WITTE CONUS EN DE CILINDER

U heeft bij de eerste stap de witte conus en de cilinder nodig. Deze twee componenten dient u op elkaar te bevestigen, zoals in het voorbeeld wordt weergegeven.

DEZE STAP
IS NIET NODIG
VOOR HET
VERGROTEN





LIBIDOPOMP

EEN GROTERE PENIS GEEFT
MANNEN MEER ZELFVERTROUWEN

- Vergroot je penis met 5 á 7 centimeter!
- Laat je penis groeien in lengte en dikte!



BESTEL IN
COMBINATIE
MET
LIBIDO7!



KLAARMAKEN VOOR GEBRUIK

STAP 2 ELASTISCHE DRUKRINGEN

Afhankelijk van de grootte van uw penis kunt u bekijken welke elastische drukring het beste om de stam van uw penis past. U pak vervolgens de juiste maat drukring en schuift deze om de witte conus heen. U kunt het beste de drukring met beide handen bevestigen. U bevestigt de elastische drukring uiteindelijk om de cilinder, zoals in het voorbeeld.

De elastische drukring zorgt ervoor dat uw penis wordt afgebonden aan het einde van het pompen.

DEZE STAP
IS NIET NODIG
VOOR HET
VERGROTEN





LIBIDOPOMP

EEN GROTERE PENIS GEEFT
MANNEN MEER ZELFVERTROUWEN

- Vergroot je penis met 5 á 7 centimeter!
- Laat je penis groeien in lengte en dikte!



BESTEL IN
COMBINATIE
MET
LIBIDO7!



KLAARMAKEN VOOR GEBRUIK

STAP 3 MAATRINGEN VAN RUBBER

U verwijdert de witte conus van de cilinder. Afhankelijk van de omtrek grootte van uw penis kunt u bekijken welke rubberen maatring het beste geplaatst kan worden op de cilinder. De maatringen waarborgen het vacuüm in de cilinder.

Zodra u de cilinder om uw penis plaatst, is het belangrijk om een goed glijmiddel gebruikt, zodat u de cilinder makkelijker kunt omschuiven. Hierdoor kleeft uw penis niet aan de wand van de cilinder.





LIBIDOPOMP

EEN GROTERE PENIS GEEFT
MANNEN MEER ZELFVERTROUWEN

- Vergroot je penis met 5 á 7 centimeter!
- Laat je penis groeien in lengte en dikte!



KLAARMAKEN VOOR GEBRUIK

STAP 4 HANDPOMP EN SLANG BEVESTIGEN

U gaat nu de plastic slang bevestigen aan de cilinder en de handpomp. Doordat de handpomp via de slang aangesloten is, kan er vacuüm in de cilinder gezogen worden.

Voordat u de pomp op uw penis plaatst, raden wij u aan om eerst de oefenen op uw hand. U plaatst de cilinder tegen uw hand en knijpt in de handpomp. U zult dan de druk voelen van het vacuüm pompen. Indien dit niet gebeurt, dan kunt u uw hand rond bewegen om de pomp beter vast te zetten. Om het vacuüm los te laten, trekt u het hendeltje naar u toe.





LIBIDOPOMP

EEN GROTERE PENIS GEEFT
MANNEN MEER ZELFVERTROUWEN

- Vergroot je penis met 5 á 7 centimeter!
- Laat je penis groeien in lengte en dikte!



GEBRUIK

STAP 5 POMPEN

Om pijnlijke situaties te voorkomen bij het vacuüm pompen, adviseren wij u om wat schaamhaar te verwijderen. Wanneer u dit gedaan heeft, en de cilinder om uw geslachtsdeel heeft geschoven, kunt u deze sluiten door de cilinder voorzichtig heen en weer te schuiven waardoor een luchtdichte verzegeling plaatsvindt.

De pomp werkt het beste als u gaat staan. Zorg ervoor dat wanneer u begint met pompen u, uw testikels niet in de cilinder plaatst. Controleer nogmaals of alles echt goed zit en begin langzaam met pompen.

Pomp de eerste keer niet meer dan drie keer en laat het bloed langzaam naar de penis stromen. Herhaal deze handeling met korte tussen pauzes om de 10 seconden.

Let erop dat u dit niet te snel doet want dat kan een verstoring van de erectie opleveren. Stop ook wanneer het pompen niet fijn voelt. Laat de penis rustig opzwellen en pomp dan weer langzaam verder. Het is belangrijk dat u dit rustig doet en hier de tijd voor neemt. De penis vult zich telkens met meer bloed en wordt hierdoor steeds groter.



LIBIDOPOMP

EEN GROTERE PENIS GEEFT
MANNEN MEER ZELFVERTROUWEN

- Vergroot je penis met 5 á 7 centimeter!
- Laat je penis groeien in lengte en dikte!



BESTEL IN
COMBINATIE
MET
LIBIDO7!



GEbruik

STAP 6 PENIS AFBINDEN

Op het moment van erectie, schuif je de elastische drukring van de cilinder af, naar jou richting toe, zodat deze over de basis van de penis komt. Zo wordt voorkomen dat het bloed wegloopt en de penis stijf blijft. De elastische drukring mag hooguit 30 minuten blijven zitten, anders kan het weefsel van de penis beschadigd raken.

NB Het kan voorkomen dat de bloedvaten in de penis niet direct reageren. Dit heeft er mee te maken dat zij nog niet gewend zijn aan dit proces. Oefen daarom eerst een paar keer en je zult merken dat je het snel onder de knie krijgt, en ontdek welke techniek het beste bij jou past!

**DEZE STAP
IS NIET NODIG
VOOR HET
VERGROTEN**



LIBIDOPOMP

Copyright © Libidopomp 2014 All Rights are reserved
www.libidopomp.nl